

SANIT Augenspülfasche inkl. steriler Füllung



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Beschreibung

- Augenspülfasche als Erste Hilfe Maßnahme bei einem Unfall mit Chemikalien etc.

Anwendungsgebiete

- Für das menschliche Auge

Anwendung

Verschlusskappe abnehmen, Kopf nach vorn beugen oder notfalls die Flasche über das Auge halten. Augenglieder mit Daumen und Zeigefinger offen halten. Flasche pumpend zusammendrücken.

Nach jedem Augenunfall und jeder erforderlich gewordenen Augenspülung ist um-gehend ein Arzt aufzusuchen.

Mindesthaltbarkeit

- 36 Monate (im versiegelten Zustand)

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	500 ml Flasche	3181



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheits-
datenblätter finden Sie auf
unserer Homepage.